

OZNACZANIE POZIOMU DABIGATRANU W SUROWICY KRWI

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Jak można oznaczyć poziom dabigatranu w surowicy krwi?

Dla ilościowego pomiaru stężenia dabigatranu w osoczu dostępny jest test inhibitora trombiny Hemoclot® kalibrowany dla dabigatranu.

2. Gdzie można dokonać oznaczenia?

Oznaczenie można wykonać w Pradze (Republika Czeska), w laboratorium szpitala Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5, Czechy.

3. W jaki sposób należy prawidłowo pobrać i przygotować próbkę krwi do oznaczenia, czy pobierający musi mieć specjalne probówki/ sprzęt?

Nie ma żadnych specjalnych wymagań przy pobieraniu próbki. Jest to standardowe pobieranie jak w przypadku podobnych tego typu testów tj. na antykoagulant cytrynianowy (0,109M) w stosunku 9:1, a następnie wirowanie przez 20 min. przy 2500g.

4. Jak przygotować materiał do wysłania?

Wypełnić formularz Zlecenia WYKONANIA OZNACZENIA INHIBITORÓW TROMBINY (do pobrania na stronie internetowej www.boehringer-ingelheim.pl) i przesłać go na fax nr: +48 71 798 58 57 lub na adres email:

info@diagnostica.cz do firmy Diagnostica a.s.,

adres pocztowy : Za Trati 686, 19 600 Praga 9, Czechy

5. Jak wysłać próbkę?

Próbkę wraz z FORMULARZEM ZLECENIA WYKONANIA OZNACZENIA INHIBITORÓW

TROMBINY należy wysłać pocztą kurierską, w temperaturze 2-8°C do laboratorium szpitala Na Homolce w Pradze, w Czechach, na adres:

Nemocnice Na Homolce,
Pani Ludomila Dvorakova - OKBH
Roentgenova 2, 150 30 Praha 5, Czechy

6. Z kim kontaktować się w razie problemów?

W razie problemów proszę kontaktować się (w języku angielskim) z Panem **Ludkiem Barkmanem** kom: **+420 775 621 720**
e-mail: ludek.barkman@diagnostica.cz

7. Ile kosztuje oznaczenie?

Koszt oznaczenia to 500 CZK